



NOUVEAU

Invacare®

Action[®]4
NG

Rigide, robuste et plus léger !



Le nouvel **Action⁴_{NG}** s'allège, il bénéficie d'une réduction de poids d'environ 1Kg comparé à son prédécesseur. L'**Action⁴_{NG}** réduit son poids tout en s'appuyant sur les fonctionnalités remarquables du modèle précédent. Doté de son double croisillon, l'**Action⁴_{NG}** offre une plus grande rigidité et une facilité de conduite incomparables. Par ailleurs, il est facilement configurable et ajustable comme tous les autres fauteuils de la famille **Action** et partage des éléments communs ce qui permet de profiter d'une intercompatibilité pour de nombreuses pièces et accessoires.

- **Un fauteuil plus léger**
- **Des fonctionnalités améliorées**
- **Un nouveau design et une large gamme de couleurs**



Réduction de poids significative

Sans compromettre les fonctionnalités ou la facilité de réglage du fauteuil, le poids de l'**Action⁴_{NG}** a été réduit d'environ 1kg. C'est en majeure partie grâce à ses supports de fourche allégés et à ses nouveaux paliers de roues arrière, tout deux en aluminium. Ces nouveaux changements montrent encore une fois que l'**Action⁴_{NG}** redéfinit la norme. L'**Action⁴_{NG}** devient encore plus facile à transporter tout en conservant sa qualité de roulage.

Une attention particulière portée aux détails

L'équipe Invacare a retravaillé le design de l'**Action⁴_{NG}** dans de multiples domaines. Une nouvelle conception de fourche offre un look plus actuel, la toile de dossier a été améliorée et la nouvelle gamme de couleurs de châssis fait évoluer le style de l'**Action⁴_{NG}**. Vous pouvez remarquer l'attention particulière donnée aux détails de chaque composant de ce fauteuil, reflétant ainsi notre objectif de fournir un style unique !

Des fonctionnalités améliorées

De nouvelles fonctionnalités intelligemment conçues rendent l'**Action⁴_{NG}** encore plus facile à utiliser que son prédécesseur. Une gâchette de verrouillage a été ajoutée sur les accoudoirs relevables et amovibles qui permet un déverrouillage aisé même avec des fonctions limitées au niveau de la main. Les accoudoirs relevables et amovibles sont désormais dotés d'une découpe au niveau des protège-vêtements ainsi que de poignées d'appui ergonomiques permettant d'optimiser les transferts.

De plus, la nouvelle conception optimisée des toiles de dossier permet désormais de s'adapter parfaitement autour des cannes de dossier pour un plus grand confort. Les toiles de dossier bi-matière noires réglables en tension une sangle et quatre sangles ont été également retravaillées, il est maintenant possible d'ajuster en hauteur la sangle lombaire ce qui offre un meilleur positionnement et un réglage plus précis en fonction de l'épaisseur du coussin d'assise.

Nous avons ajouté toutes ces fonctionnalités car nous savons que les détails sont importants dans la vie de tous les jours.

Facilement configurable et interchangeable

Avec ces nouvelles améliorations, l'**Action⁴_{NG}** réussit à être totalement compatible avec les autres membres de la famille Action, cela signifie que tous les nouveaux composants du fauteuil roulant s'adaptent aux modèles précédents.





Légèreté

L'**Action⁴_{NG}** possède un poids de base de 14,4 kg et un poids de transport de 8,4 kg (sans repose-jambes, accoudoirs et roues arrière). Ses roues allégées permet d'obtenir un poids de fauteuil complet à partir de 14 kg !




Nouveaux paliers de roues arrière

Les nouveaux paliers de roues arrière en aluminium combinent légèreté et fonctionnalité.



Nouveaux paliers de roues arrière

Les nouveaux paliers de roues arrière en aluminium combinent légèreté et fonctionnalité.

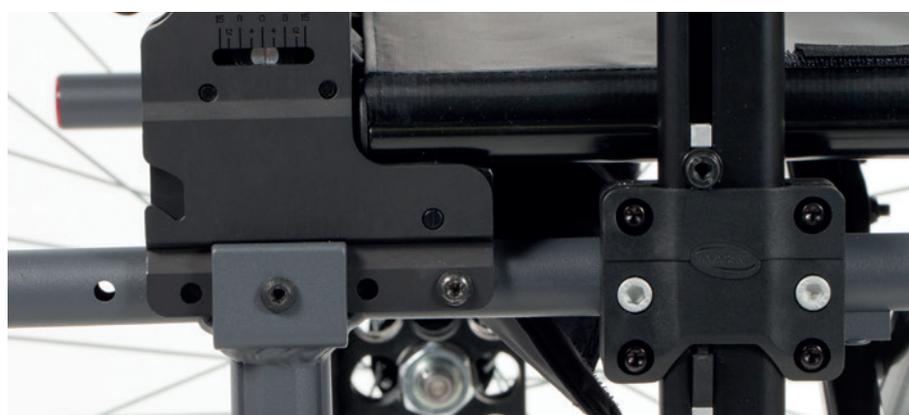

Dossier rabattable et réglable en continu

Ce dossier innovant, breveté et réglable en angle - provenant de l'**Action⁵** - permet un réglage en angle du dossier avec l'utilisateur assis dans son fauteuil. Le système de pliage unique permet d'avoir un encombrement réduit du châssis et un dossier qui se rabat facilement sur l'assise, rendant ainsi le fauteuil compact. Son système de pliage simple facilite son stockage et son transport.



Accoudoirs rabattables No. 2 et No. 3

Les deux accoudoirs ont un verrouillage et une découpe pour que l'accoudoir puisse être plié facilement. De plus, No. 3 est réglable en hauteur.



Soutien amputé

Réglable en angle, en hauteur et en profondeur, le support amputé est également escamotable.



Roues avant

Les roues avant sont disponibles en 5", 6" et 8" pneumatique ou bandage avec des largeurs différentes.



Crochet attaché

Permet une fixation simple et sûre dans un véhicule.



Invacare **Action⁴_{NG} Dual HR**

Spécialement pour les utilisateurs hémiparétiques, ce système à double main-courante garantit un démontage rapide.



Ceintures de positionnement **Bodypoint[®]**

Ceintures 2 points ou 4 points rembourrées et confortables pour un bon positionnement. Disponibles en option montée.



Coussins **Matrx**[®]

La gamme s'étend des coussins de base aux coussins **Matrx Libra** haut de gamme. Invacare dispose d'une large gamme des coussins qui correspond aux besoins de l'utilisateur. Les dossiers *Invacare Matrx Elite* et *Elite Deep* ont été livrés avec le système quick release EasyMount, ce qui permet un démontage rapide et simple lorsque le fauteuil est plié. La large gamme des coussins et des dossiers garantit que les utilisateurs peuvent être bien positionnés dans l'**Action⁴ NG**.



Repose-jambes à compensation

Réglables en inclinaison de 0° à 80°. Blocage automatique à l'angle souhaité. Appui-mollets réglables en hauteur et en profondeur.

Dossier inclinable

Le dossier inclinable par cremaillères permet aux soignants ou à la tierce personne d'effectuer des réglages rapides et simples, tout en limitant le poids total du fauteuil.



Appui-tête

Un large choix d'appui-têtes et d'appui-nuques est proposé en option - y compris l'appui-tête *Elan primé* - pour fournir aux utilisateurs du confort et du soutien au maximum.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Pente d'assise	Hauteur d'assise	Angle de dossier	Hauteur du dossier	Angle des potences
<i>Invacare Action⁴_{NG} à propulsion manuelle</i>	380/405/430/ 455/480/505/ 555/605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	325 - 510 mm	80° / 0° - 80°
<i>Invacare Action⁴_{NG} à Transit</i>	380/405/430/ 455/480/505/ 555 / 605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30°/ - 15° - +15°	380 - 460 mm	80° / 0° - 80°

	UL	Hauteur des accoudoirs	Largeur hors-tout	Largeur pliée hors-tout	Longueur hors-tout avec potence	Longueur hors-tout sans potence	Hauteur hors-tout
<i>Invacare Action⁴_{NG} à propulsion manuelle</i>	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Largeur d'assise + 190 mm	305 mm	995 - 1170 mm	850 - 1025 mm	810 - 1040 mm
<i>Invacare Action⁴_{NG} à Transit</i>	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Largeur d'assise + 160 mm	265 mm	950 - 1050 mm	805 - 905 mm	910 - 1040 mm

	Pente max. de stabilité	Rayon de giration	Poids max. utilisateur	Poids du fauteuil	Poids de transport
<i>Invacare Action⁴_{NG} à propulsion manuelle</i>	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14,0 kg	8,0 kg
<i>Invacare Action⁴_{NG} à Transit</i>	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14,5 kg	11,7 kg



1. Version Heavy duty

Coloris de châssis


Hypnotic Purple

Matt Black

Blue Pop

Matt Red

Black Nylon

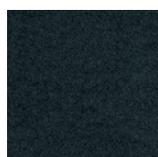

Pearl White

Slate Grey

Electric Green

Anthracite Black



Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Revêtement du siège

Trusted Solutions,
Passionate People

